


COLLOST® гель протокол работы с возрастной атрофией кожи

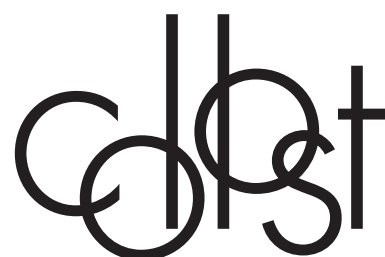

Подготовительный этап

Гель обладает определенной вязкостью, поэтому перед процедурой шприц с гелем необходимо нагреть в термостате при температуре 38 °С или термокружке.

COLLOST® гель 7%	Температура воды в термокружке до 45°С	Время нагрева 2–3 минуты	Иглы: 33–34 G 4 мм – вокруг глаз 32 G 4 мм – остальные участки
COLLOST® гель 15%	Температура воды в термокружке до 50 С°	Время нагрева 15–20 минут	Иглы: 31–30 G 4 мм – вокруг глаз 30–29 G 4-6-13 мм – остальные участки

Протокол процедуры

1. Обработка кожи антисептиком.
2. Нанесение аппликационной анестезии.
3. Очищение области коррекции от анестетика антисептиком.
4. Внутрикожное введение COLLOST® геля в технике точечных инъекций. Инъекции выполняются частыми поверхностными микропапулами, расстояние между рядами и соседними папулами – не более 2–5 мм, в области век – 2–3 мм. В области морщин/складок инъекции располагаются одна к одной, без промежутков. Гель вводится в количестве 0,01–0,02 мл на каждую точку инъекции с формированием папулы. Возможно линейное и коротко-линейное введение. Для получения хорошего результата требуется плотная укладка.
5. Финишная обработка кожи постпроцедурным спреем COLLOST®. Распыление с расстояния 20–25 см или в виде опитанной тканевой маски.


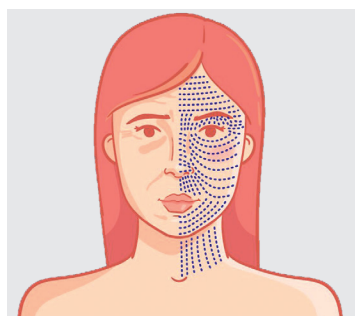


Схема плотной укладки



Возможность терапии кожи верхнего и нижнего века до ресниччатого края

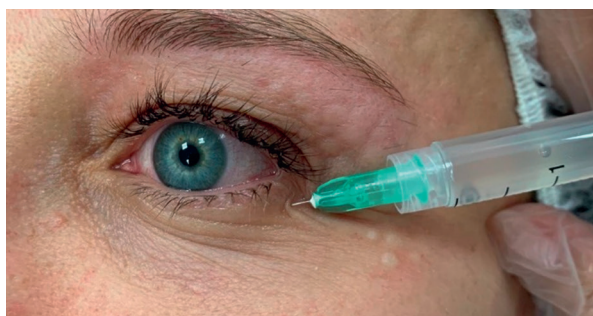

Рекомендованный курс процедур

Минимальный курс: 3–5 процедур с промежутком между процедурами от 3 недель до 1,5 месяцев
Поддерживающий курс: 1 раз в 2–3 месяца

Видеоинструкции



Нагрев гелей



Зоны введения



Правила инъекций



Материал предназначен для специалистов здравоохранения

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией.