


COLLOST® micro

протокол работы с возрастной атрофией кожи

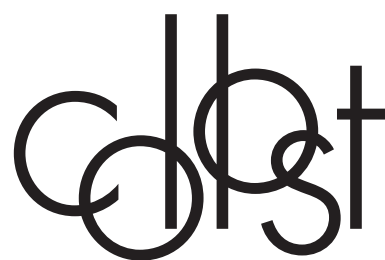

Подготовительный этап (гидратация)

COLLOST® micro непосредственно перед процедурой необходимо гидратировать до получения гомогенной суспензии.

Гидратация материала:

- физиологическим раствором
- сертифицированными мезотерапевтическими препаратами (по показаниям)
- аутологичной плазмой, антикоагулянт – цитрат натрия (предварительная гидратация на 1,5 мл физиологическим раствором)

Таблица гидратации

Объем гидранта	5 мл	3 мл	2,5 мл	2 мл	1,5 мл
Концентрация коллагена	3%	5%	6%	7,5%	10%

Размер игл:

в области глаз – 33G x 4mm; 34G x 4mm
лицо, шея, декольте – 32G x 4mm, 30Gx4 mm, 30Gx13 mm
тело (руки, ноги и т.д.) – 32Gx4 mm, 30Gx4 mm, 30G x13 mm

Протокол процедуры

1. Обработка кожи антисептиком.
2. Нанесение аппликационной анестезии (при необходимости).
3. Очищение области коррекции от анестетика антисептиком.
4. Техники введения:
 - внутрикожное введение COLLOST® micro в технике «плотной укладки» микропапулами, расстояние между рядами и соседними папулами – не более 5–7 мм, в области век – 2–3 мм. В области морщин/складок инъекции выполняются без промежутков.
 - коротко-линейная техника: под минимальным углом и углом 30°.
 - линейно-ретроградная техника.
 - микроболусная (работа со связочным аппаратом).

После введения препарата папулы увеличиваются в 3–4 раза.

5. Финишная обработка кожи постпроцедурным спреем COLLOST®. Распыление с расстояния 20–25 см или в виде пропитанной тканевой маски.

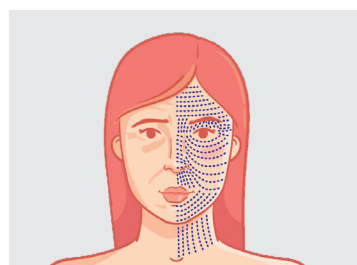


Схема плотной укладки



Возможность терапии кожи верхнего и нижнего века до ресниччатого края



Рекомендованный курс процедур

Минимальный курс: 3-5 процедур с промежутком между процедурами в 2-3 недели

Поддерживающий курс: 1 раз в 3-4 месяца

Видеоинструкции



Гидратация



Зоны введения



Правила инъекций



Материал предназначен для специалистов здравоохранения

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией.