


Таблица гидратации COLLOST® micro 0,15 г

Персонализация

Возможность выбора компонентов для гидратации позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому пациенту

Варианты гидратации COLLOST micro 0,15г

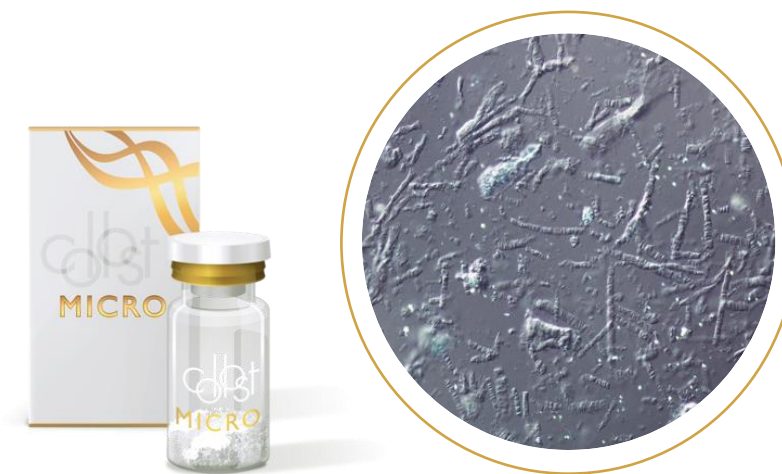

Объем гидратанта	5 мл	3 мл	2.5 мл	2 мл	1.5 мл	1 мл
Концентрация коллагена	3%	5%	6%	7.5%	10%	15%

Допускается вариативность количества гидратанта согласно инструкции

Таблица гидратации COLLOST® micro 0,45 г

Персонализация

Возможность выбора компонентов для гидратации позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому пациенту

Варианты гидратации COLLOST micro 0,45 г

Объем гидратанта	15 мл	9 мл
Концентрация коллагена	3%	5%

Допускается вариативность количества гидратанта согласно инструкции

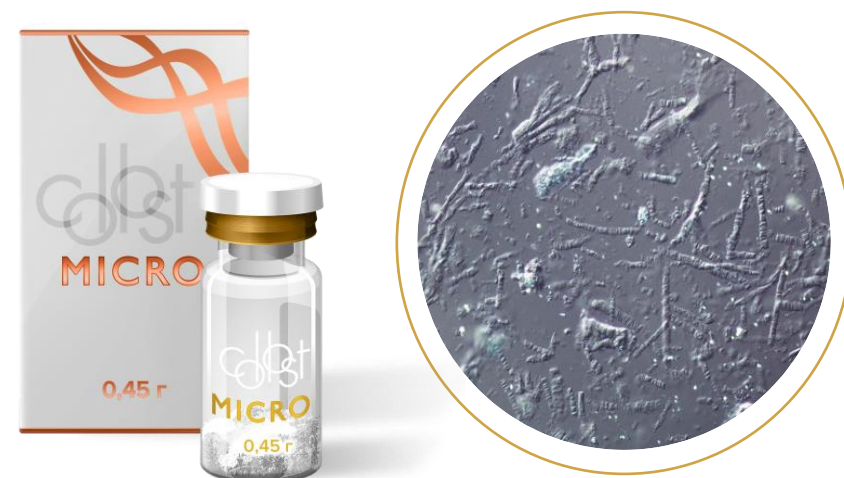



Таблица гидратации COLLOST® micro 0,05 г

Персонализация

Возможность выбора компонентов для гидратации позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому пациенту

Варианты гидратации COLLOST micro 0,05 г

Объем гидратанта	1,7 мл	1 мл	0,5 мл
Концентрация коллагена	3%	5%	10%

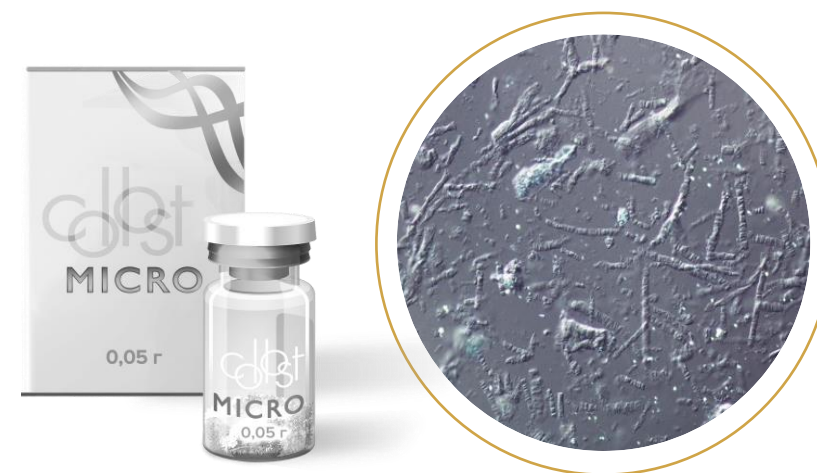

Допускается вариативность количества гидратанта согласно инструкции