


COLLOST® micro

протокол работы с возрастной атрофией кожи

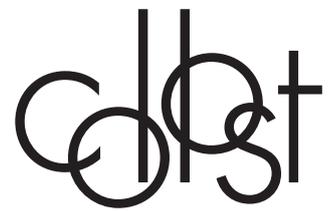

Подготовительный этап (гидратация)

COLLOST® micro непосредственно перед процедурой необходимо гидратировать до получения гомогенной суспензии. Гидратация материала: физиологическим раствором, сертифицированными мезотерапевтическими препаратами (по показаниям), аутологичной плазмой (антикоагулянт – цитрат натрия).

При работе с плазмой требуется предварительная гидратация COLLOST® micro физиологическим раствором в зависимости от дозировки.	Объем COLLOST® micro, г	0,05	0,15	0,45
	Объем физ. раствора, мл	0,5	1,5	9,0

Таблица гидратации

Дозировка COLLOST® micro	0,05 г			0,15 г						0,45 г	
Объем гидранта, мл	1,7	1,0	0,5	5,0	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	15	9
Концентрация коллагена, %	3	5	10	3	5	6	7,5	10	15	3	5

Размер игл:

в области глаз	лицо, шея, декольте	тело (руки, ноги и т.д.)
33Gx4 mm; 34Gx4 mm	32Gx4 mm, 30Gx4 mm, 30Gx13 mm	32Gx4 mm, 30Gx4 mm, 30Gx13 mm

Допускается добавление лидокаина!

Для уменьшения дискомфорта при проведении процедуры допускается добавление стерильного раствора лидокаина гидрохлорида 2% в расчете 0,04–0,10 мл на 1,0 мл гидратированного изделия согласно инструкции. **Не рекомендуется добавлять лидокаин при инъекциях в зону периорбиты**, так как это может усилить отек. Важно собрать анамнез и не использовать лидокаин при наличии непереносимости.

Протокол процедуры

1. Обработка кожи антисептиком.
2. Нанесение аппликационной анестезии (при необходимости).
3. Очищение области коррекции от анестетика антисептиком.
4. Техники введения:
 - внутрикожное введение COLLOST® micro в технике «плотной укладки» микропапулами, расстояние между рядами и соседними папулами – не более 5–7 мм, в области век – 2–3 мм. В области морщин/складок инъекции выполняются без промежутков.
 - коротко-линейная техника: под минимальным углом и углом 30°.
 - линейно-ретроградная техника.
 - микроболусная (работа со связочным аппаратом).

После введения препарата папулы увеличиваются в 3–4 раза.

5. Финишная обработка кожи постпроцедурным спреем COLLOST®. Распыление с расстояния 20–25 см или в виде пропитанной тканевой маски.

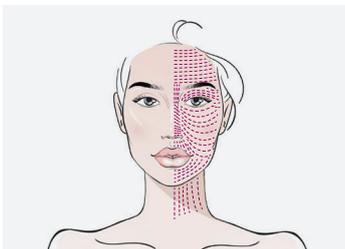


Схема плотной укладки



Возможность терапии кожи верхнего и нижнего века до ресничного края



Рекомендованный курс процедур

Минимальный курс: 3–5 процедур с промежутком между процедурами в 2–3 недели

Поддерживающий курс: 1 раз в 3–4 месяца

Видеоинструкции



Гидратация



Зоны введения



Правила инъекций



Материал предназначен для медицинских работников

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией.