

colst



# НАТУРАЛЬНЫЙ ИНЪЕКЦИОННЫЙ КОЛЛАГЕН I ТИПА

Материал предназначен для медицинских работников

Уникальные препараты COLLOST® (КОЛЛОСТ®) обеспечивают основными биологическими ресурсами ткани для синтеза компонентов собственного внеклеточного матрикса. Препарат содержит коллаген I типа, по составу и структуре максимально приближенный к коллагену человека.

Натуральный инъекционный коллаген, восполняющий основной компонент соединительных тканей, восстанавливает дерму, каркас подкожно-жировой клетчатки, структуру связочного аппарата за счет активации ремоделирования внеклеточного матрикса, запуска регенерации, стимуляции образования новых коллагеновых волокон. Сочетание уникальных биологических свойств позволяет препаратам COLLOST® (КОЛЛОСТ®) решать широкий спектр эстетических задач.

Благодаря инъекциям COLLOST® (КОЛЛОСТ®) кожа становится более упругой и подтянутой, овал лица обретает более четкие контуры, происходит значительное выравнивание рельефа кожи и нормализация структуры тканей в областях с рубцовыми деформациями.

Широкие возможности продуктов линейки COLLOST® (КОЛЛОСТ®) для терапии возрастных и эстетических изменений кожи позволяют проводить процедуры, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента.

#### **ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Возможность использования в любом возрасте
- Максимально быстрый эффект
- Пролонгированное действие препарата

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ:**

COLLOST® (КОЛЛОСТ®) обладает низкой иммунотропной и аллергенной активностью. Уникальная технология отбора и обработки коллагенсодержащего сырья, его очистки и последующей стерилизации обеспечивает гарантированную инактивацию бактерий, вирусов и прионов, а также сохранность структуры коллагена.

---

# НАГРАДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Препараты COLLOST® (КОЛЛОСТ®) изготовлены в соответствии с уникальной запатентованной технологией выделения коллагена, которая была отмечена Большой золотой медалью в области медицины на XXIII Международной выставке изобретателей в Женеве (Швейцария) и удостоена специального приза жюри.


Для производства COLLOST® micro применяют новейшие запатентованные технологии MicronONIC® и PoliONICol®.



## PoliONICol®

Polianionic Outstanding Native  
Innovative Collagen


Технология PoliONICol® позволяет усилить гидратирующие свойства коллагена за счет создания отрицательных зарядов на поверхности молекулы белка (коллагена), что позволяет волокнам белка удерживать значительно большее количество воды в тканях.

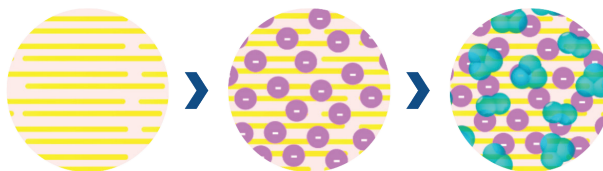

## MicronONIC®

Micronized Outstanding Native  
Innovative Collagen

MicronONIC® – технология микроструктурирования коллагена, позволяющая формировать материал, состоящий из переплетающихся нитевидных биомиметических частиц. Капиллярные пространства между микроволокнами притягивают и удерживают воду, способствуют проникновению клеток в толщу материала. Волокнистая структура микрочастиц служит как биологическим, так и механическим активатором процесса регенерации, стимулирует неоколлагеногенез.

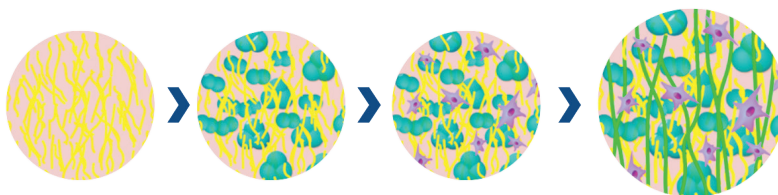

# COLLOST<sup>®</sup> micro 0,05 / 0,15 / 0,45 г



Допускается  
добавление  
лидокаина!

- Стерильный микронизированный коллаген I типа во флаконе
  - Создан на основе уникальных запатентованных технологий PoliONICol<sup>®</sup> и MicronONIC<sup>®</sup>
  - Возможность терапии кожи верхнего и нижнего века до ресничного края
  - Видимый эффект уже после первого применения на 3–5 день
  - Возможность выбора компонентов для гидратации (физиологический раствор, плазма крови пациента, стерильные препараты аминокислот, микроэлементов)
- 
- Концентрация коллагена: 3–10% (в зависимости от объема гидратирующего вещества)
  - Формы выпуска: флакон 0,05 г / 0,15 г / 0,45 г
  - Интервал между процедурами: 2–3 недели
  - Рекомендуемый размер игл: 30–34G длиной 4–13 мм
  - Техники введения: линейная, коротко-линейная, папулярная, точечных инъекций

## ПОКАЗАНИЯ:

- Возрастные и эстетические инволюционные изменения кожи лица, тела, рук, ног различной этиологии
- Истончение, дряблость, снижение эластичности кожи
- Гипотрофические и атрофические рубцовые деформации, в т.ч. стрии

## РЕКОМЕНДАЦИИ:

После введения во флакон гидратирующей жидкости в течение 5 минут необходимо активное «встряхивание» до получения однородного инъекционного материала. Применение в течение 2 часов.

# COLLOST® гель, 7%

- Видимый эффект уже после первого применения
- Возможность терапии кожи верхнего и нижнего века до ресничного края
- Эффективная терапия кожи при сниженном регенераторном потенциале



- Концентрация коллагена: 7%
- Формы выпуска: шприц 0,1 мл/0,5 мл/1,0 мл/1,5 мл
- Интервал между процедурами: 3–4 недели
- Рекомендуемый размер игл: 30–33G длиной 4–13 мм
- Техники введения: линейная, коротко-линейная, точечных инъекций

## ПОКАЗАНИЯ:

- Ослабление тургора (эластичности) кожи при инволюционных изменениях кожи
- Гипотрофические и атрофические рубцы после акне, ветряной оспы, стрии
- Посттравматическая и послеоперационная депрессия кожных покровов

## РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед процедурой необходимо разогреть препарат до температуры 38 °C в термостате 15 минут до перехода геля в жидкое состояние или в термोकружке при температуре воды 45 °C 2–3 мин.

При работе с рубцовой тканью COLLOST® гель необходимо инъектировать в рубец и переходную ткань вокруг рубца.

# COLLOST® гель, 15%



- Максимальная концентрация коллагена на мировом рынке
  - Выраженный эффект уже после первого применения
  - Возможность терапии кожи верхнего и нижнего века до ресничного края
  - Эффективная терапия рубцовых изменений кожи
- 
- Концентрация коллагена: 15%
  - Формы выпуска: шприц 1,0 мл, 1,5 мл
  - Интервал между процедурами: от 3-х недель до 2-х месяцев
  - Рекомендуемый размер игл: 26–31G длиной 4–13 мм / канюля 23–25G
  - Техники введения: линейная, коротко-линейная, точечных инъекций

## ПОКАЗАНИЯ:

- Ослабление тургора (эластичности) кожи при инволюционных изменениях кожи
- Гипотрофические и атрофические рубцы после акне, ветряной оспы, стрии
- Посттравматическая и постоперационная депрессия кожных покровов

## РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед процедурой необходимо разогреть препарат до температуры 38 °С в термостате не менее 15–20 минут до перехода геля в жидкое состояние или в термोकружке – температура воды 50 °С, необходимо дополнительное нагревание в течение процедуры.

При работе с рубцовой тканью COLLOST® гель необходимо инъецировать в рубец и переходную ткань вокруг рубца.

# COLLOST® спрей постпроцедурный

**ФОРМА ВЫПУСКА:** спрей 100 мл

**СОСТАВ:** гидролизат коллагена, ментил лактат, ацетил гексапептид-49, гиалуроновая кислота.

Постпроцедурный спрей применяется после инъекционных методик, химических пилингов, а также в качестве самостоятельного ухода.

Рекомендуется распыление с расстояния 20–25 см или в виде маски (пропитывается тканевая заготовка).

Спрей помогает быстро снять раздражение, оказывает противовоспалительное действие и укрепляет естественный барьер кожи.



## Для заметок



---

---

---

---

Производитель:  
ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»

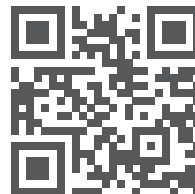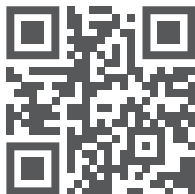

[www.collost.ru](http://www.collost.ru)

