

# COLLOST® micro 0,45 г

## Протокол работы по телу с возрастной атрофией кожи



### Подготовительный этап (гидратация)

COLLOST® micro непосредственно перед процедурой необходимо гидратировать до получения гомогенной суспензии. Гидратация материала: физиологическим раствором, сертифицированными мезотерапевтическими препаратами (по показаниям), аутологичной плазмой (антикоагулянт – цитрат натрия).

Таблица гидратации

Дозировка COLLOST® micro	0,45 г	
Объем гидратанта, мл	15	9
Концентрация коллагена, %	3	5

Для уменьшения дискомфорта при проведении процедуры допускается добавление стерильного раствора лидокаина гидрохлорида 2% в расчете 0,04–0,10 мл на 1,0 мл гидратированного изделия согласно инструкции. **Важно собрать анамнез и не использовать лидокаин при наличии непереносимости!**


### Протокол процедуры

1. Обработка кожи антисептиком.
2. Нанесение аппликационной анестезии (при необходимости).
3. Удаление остатков аппликационной анестезии и начало процедуры.
4. Техники введения:
  - Канюльная техника (веер): канюля 22–25G x 50 мм;
  - Папульная техника: диаметр 2–3 мм, расстояние между папулами 0,5–1,0 см, иглы 32–31G x 4мм;
  - Коротколинейная техника: расстояние 0,5–1,0 см, иглы 32–31G x 4–6 мм;
  - Линейно-ретроградная техника, веерная техника: иглы 30G x 13 мм.

Расход 1,5–2,5 мл на площадь 15 x 15 см.

5. Нанесение COLLOST® спрея постпроцедурного для улучшения процессов регенерации и для обеспечения защитной пленки.

### Схемы работы:

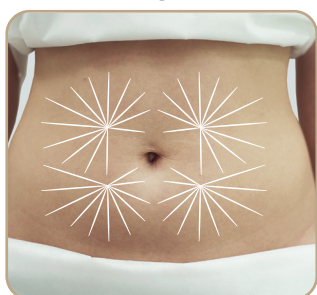

зона «Живот»



зона «Колени»



зона «Локти»



зона «Ягодицы»

### Рекомендованный курс процедур

Минимальный курс: 3–5 процедур с промежутком между процедурами в 2–3 недели

Поддерживающий курс: 1 раз в 3–4 месяца

#### Видеоинструкции



зона «Живот»



зона «Колени»



зона «Локти»



зона «Ягодицы»

#### Обучение



график мероприятий



Материал предназначен для медицинских работников

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией.