


Дозозависимость: какой объем препарата нужно вводить?

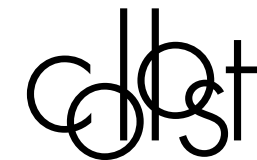

Количество строительного материала напрямую влияет на выраженность и стабильность результата процедуры.


Недостаточная имплантация не даст полноценного ремоделирования, избыточная — увеличит срок регресса папул.

Ограниченная емкость дермы ведет к распределению препарата в ПЖК и дополнительную отечность.


«Правило ладони»



Минимальная эффективная дозировка — 1.5 мл на площадь одной ладони

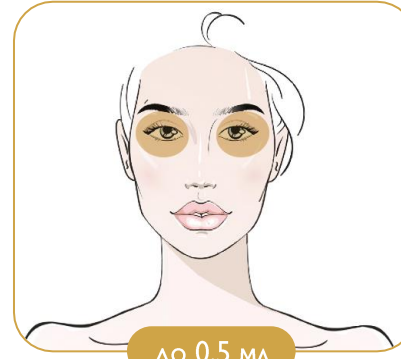

область вокруг глаз

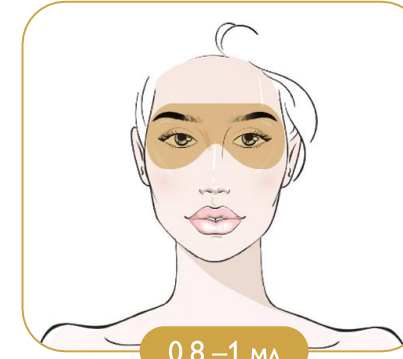

область вокруг глаз + виски



Вероятность отеков и застойных явлений возрастает при:

- слишком глубоком введении
- превышении дозировок

Практические ориентиры по объёму:

- 0,5 мл — периорбитальная область
- 0,8–1 мл — периорбитальная область + латеральная область глаз + височные области

Для работы по лицу действует правило ладони:

1,5 мл эффективно распределяется на участок, сопоставимый с площадью одной ладони пациента вместе с пальцами. Это позволяет сформировать равномерный коллагеновый каркас без локальной гиперкоррекции. При рубцовых изменениях допустима более плотная имплантация в рубцовую ткань.