

PCOLL-21®

АКТИВНЫЙ БИОМИМЕТИК

НОВИНКА

СТАРТ ПРОДАЖ
СЕНТЯБРЬ 2026

Новый класс инъекционных препаратов,
воспроизводящих внеклеточный матрикс кожи

PColl-21® Hydro

флакон 5 мл

PColl-21® — первый биомиметик*
(модель внеклеточного матрикса
дермы), сочетающий пептидно-
коллагеновый комплекс INNEUM®
и двухфракционную гиалуроновую
кислоту.

Состав

- Коллаген I типа 5,0 мг
- Гиалуронат натрия ВМ 1,5 мг
- Гиалуронат натрия НМ 2,0 мг
- Фосфатно-солевой буфер
до конечной массы 1,0 г

Назначение

Коррекция областей, подверженных
начальным эстетическим
изменениям для применения
у молодых пациентов (при наличии
сухости и тусклого цвета кожи,
мелких морщин).




ИДЕАЛЬНЫЙ ТАНДЕМ
НЕ ТРЕБУЕТ ДОБАВЛЕНИЯ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА

Пептидно-
коллагеновый
комплекс INNEUM®

Низко-
молекулярная ГК

Высоко-
молекулярная ГК

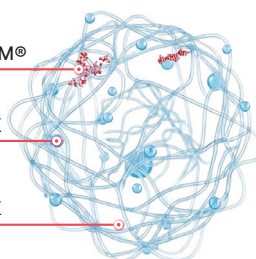

* Биомиметик внеклеточного матрикса — это материал, который повторяет естественную структуру дермального матрикса за счет сочетания структурных высокомолекулярных компонентов и низкомолекулярных биосигнальных фракций.

PCOLL-21®

АКТИВНЫЙ БИОМИМИТИК



pcoll.ru

Результат монотерапии PColl-21® Hydro

Восстановление гидробаланса, повышение тургора, разглаживание мелких морщин, улучшение цвета и текстуры кожи.

Сочетанное применение с COLLOST® micro

PColl-21® Hydro создаёт в дерме вязкоэластичный ГК-матрикс, обеспечивая равномерное распределение коллагеновых волокон COLLOST® micro, пролонгируя их действие. Пептидно-коллагеновый комплекс INNEUM® активирует фибробласты и неоколлагеногенез.

Результат комбинации: физиологическое восстановление дермального матрикса, упругости кожи, выраженное разглаживание морщин.

Зоны введения



Лицо



Зона вокруг глаз
(периорбитально)



Шея и декольте



Тыл кистей



Все тело
(живот, колени и др.)

Техники введения

Папулярная, коротко-линейная, линейно-ретроградная, бугорковая.

Глубина введения

Дерма и гиподерма
с адаптацией по зонам.

Курс процедур

- Базовая терапия: **3-5 процедур** с интервалом **2-4 недели**;
- Поддерживающая терапия: каждые **3-6 месяцев** в зависимости от степени фото- и хроностарения, а также образа жизни и вредных привычек пациента.



БИОФАРМА
ХОЛДИНГ

Производитель:
ООО «БИОФАРМАХОЛДИНГ»

Имплантат инъекционный на основе коллагена
PColl-21® (Пиколл-21) РУ № Г004-00110-00/04800719
Имплантат внутридермальный на основе коллагена
COLLOST® micro (КОЛЛОСТ микро) РУ № РЗН 2021/15044

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ